


-腸内フローラ・代謝物分析用- 糞便の採取手順

メタロキーパー（糞便）採取キット

キット内容をご確認ください。


- | | |
|----------------|----|
| a) スプーン | 1本 |
| b) 採便容器 | 1本 |
| c) 蓋（液体入り） | 1個 |
| d) 便すり切り棒（紙製） | 1本 |
| ・採使用シート（説明書付き） | 1枚 |
| ・本説明書 | |

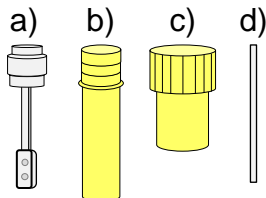


⚠️ ご注意 ⚠️

- ・採取手順に従い、ご使用ください。
- ・容器に亀裂や破損がある場合には、ご使用をおやめください。
- ・保存液が誤って皮膚、粘膜や傷口に付いたり、目や口に入った場合には、水で十分に洗い流してください。直ちに害を与えるものではありませんが、刺激が残る場合は必要に応じて、医師の診察を受けてください。
- ・乳幼児やペットの手が届かないところに保管ください。
- ・使用後は速やかに蓋をしてください。
- ・蓋の開け閉めの際に、手や指をはさまないようにご注意ください。
- ・使用後の容器は、横向きや逆さにならないようにして、冷暗所（室温：30℃以下）、または冷蔵庫で保管してください。


1 採使用シートを便器に準備する
採使用シート上に排便する

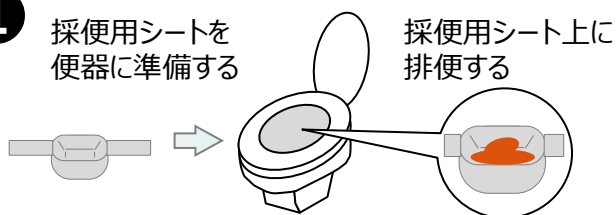


2 複数の場所から便をすくい取る
便すり切り棒で、余分な便を除く

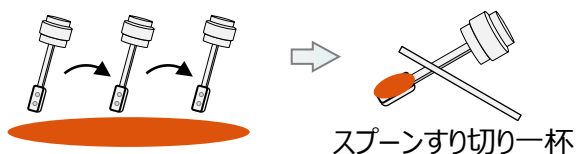


3 スプーンを容器の口に便がつかないように入れる
スプーンを奥まで差し込む

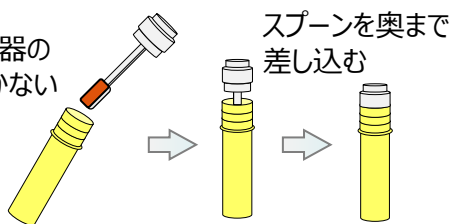

4 蓋をスプーンの上から容器に取り付ける
パキッと音がなるまで締める
5~6回振る

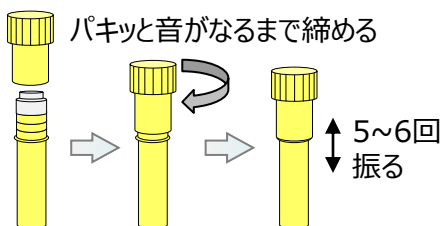

5 提出まで、入っていたビニール袋に入れ、立てた状態で、冷暗所、または冷蔵で保管

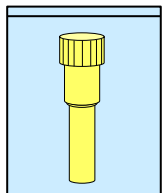

採使用シートの「使用上の注意」をよく読んでから、ご準備ください。

ご注意 採使用シートを便器に準備する前に、排尿を済ませておいてください。

採使用シートはトイレにそのまま流せます。

スプーン部分のみに便がつくように、場所を変えながら複数回すくい取ってください。

便すり切り棒で、すり切り一杯になるようにこそぎ落としてください。

※ 便すり切り棒は水に溶けるのでトイレに流してください

スプーン部分を容器の口につかないように容器の奥まで差し込んでください。

蓋をきちんと閉めると、中の保存液が容器に入ります。保存液が入ったことをご確認ください。

容器を5~6回振って中身を混ぜます。

採便容器は、入っていたビニール袋に入れて、横向きや逆さにならないように、冷暗所（室温：30℃以下）、または冷蔵庫で保管してください。