

-腸内環境分析用- 糞便の採取手順 (スプーン型)




ご注意



腸内環境分析用糞便採取キット

キット内容を確認してください。

- ・採取容器 1本
- ・採便用シート 1枚
(らくとりシート、または楽流カップ)
- ・説明書

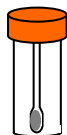


- ・採取手順に従い、ご使用ください。(直接、肛門に指してのご使用はおやめください。)
- ・容器に亀裂や破損がある場合には、ご使用をおやめください。
- ・乳幼児やペットの手が届かないところに保管ください。
- ・使用時以外は、蓋を開けず、使用後は速やかに蓋をしてください。
- ・蓋の開け閉めの際に、手や指をはさまないようにご注意ください。
- ・使用後の容器は、横向きや逆さにならないようにして、速やかに冷凍保存してください。(−35℃以内推奨: −50℃以下の保管には適していません)




採便用シートの「使用上の注意」をよく読んでからご準備ください。

ご注意 採便用シートを便器に準備する前に、必ず排尿を済ませておいてください。

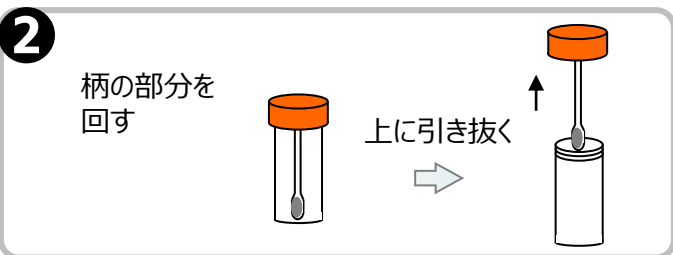


茶色の蓋側を上にしてお持ちください。

※ 蓋以外のスプーンや柄の部分を素手で触らないでください。

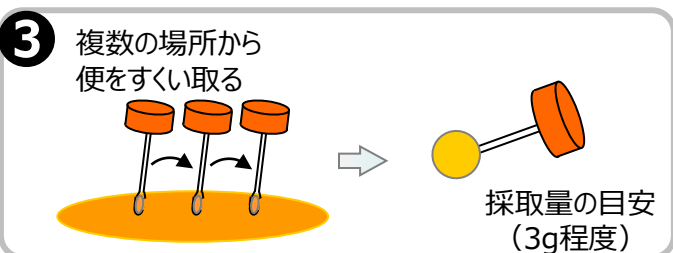


スプーン部分のみに便がつくように、場所を変えながら複数回すくい取ってください。

※ 余分に便を取り過ぎると容器からはみ出しますのでご注意ください。

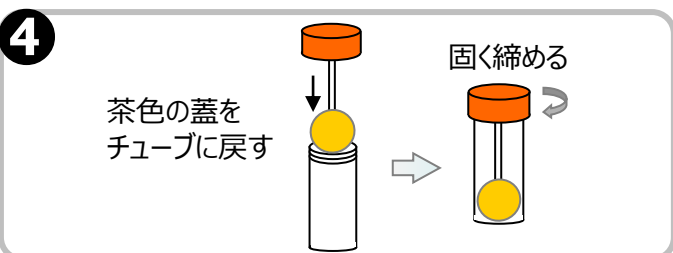

茶色の蓋が回らなくなるまで固く締めて、きちんと密閉されたことをご確認ください。

※ 中身が漏れないようにしっかりと蓋を締めてください。

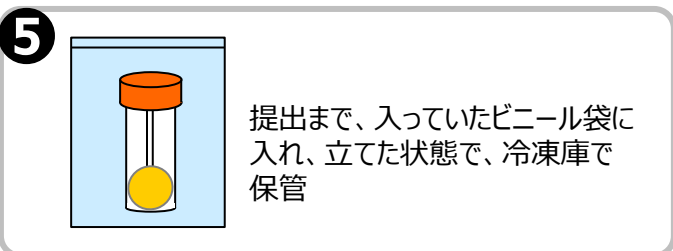

採便容器は、入っていたビニール袋に入れて、横向きや逆さにならないように、冷凍庫で保管してください。